

¿Presión en la vejiga?
¿Debo cargar una bolsa de orina?

MiroValve® la revolución en las válvulas de catéter Confort máximo y más seguridad, día a día.

El desarrollo reciente de MiroValve® constituye una invención revolucionaria, la cual le da a cada paciente la posibilidad de alcanzar una calidad de vida máxima. Los médicos que se preocupan por sus pacientes prescriben la válvula de catéter MiroValve®

1. Sencillo – Fácil manejo



La válvula de catéter MiroValve® está diseñada para ser manejada con una mano de forma fácil. Gracias a su lengüeta deslizante puede abrir la

válvula y vaciar la vejiga sin esfuerzo. Para ello, sujete la válvula sobre la tasa del inodoro y deslice la lengüeta.

Para más detalles sobre el uso, consulte el folleto incluido en cada paquete.

La lengüeta deslizante cuenta con un diseño ergonómico, apto tanto para personas zurdas o diestras, y se desliza suavemente. Además, está fabricada con un material antideslizante que ofrece seguridad y comodidad durante su uso.

Para abrir la válvula, solo debe deslizar la lengüeta en dirección al cuerpo y la orina saldrá sin problema. Al soltar la lengüeta deslizante la válvula se cierra automáticamente. ¡Así de sencillo es usarla!

2. Innovación técnica



Sin preocupaciones al ir a la cama: Si utiliza una bolsa urinaria durante la noche, conéctela al extremo azul de la válvula.

Esta cuenta con un mecanismo de apertura automático que se activa al conectar la bolsa, lo que evita que se tenga que deslizar la lengüeta.

Para que puedas descansar toda la noche MiroValve® se mantiene abierta toda la noche, permitiendo que la orina fluya de manera continua hacia la bolsa.

Además, cuenta con un mecanismo automático de cierre. Al retirar la bolsa, solo debe sujetar el extremo azul de la válvula, retire la bolsa de manera lineal. De esta forma, la válvula se cierra automáticamente.

MiroValve® garantiza una higiene total y proporciona absoluta seguridad para pacientes y cuidadores, o personal de asistencia.

La patente ya está solicitada y el producto es hecho en Alemania

3. Moderno



Ya no existe la incomodidad de ensuciar toda la cama o la ropa, evitando así malos olores.

Se reduce el riesgo de infecciones por tapones de catéter y se suprime la búsqueda de la tapa.

4. Universal



Puede usar la válvula de catéter MiroValve® con todos los tamaños de catéter, y las bolsas de orina corrientes. La válvula se ajusta a los embudos de los fabricantes más comunes de catéteres, y también es apta para casi todos los tipos de bolsas.

5. Rápido y seguro



Instalar la válvula MiroValve® con el catéter y, si es necesario, la bolsa urinaria. Es muy sencillo

Sólo debes insertar la parte superior de la válvula en el catéter de la orina.

El material antideslizante asegura que se mantenga en su lugar, evitando que se escape de manera accidental.

A continuación, conecte el conector de la bolsa de orina al extremo azul de la válvula, y esta se asegurará de inmediato.

